

ANBAUANLEITUNG

Artikel-Nr.: 341100



Invacare Action 1R
ohne Trommelbremse

Sitzbreite: 38 - 50.5 doppelte Radaufnahme

max-e

www.aat-online.de




Ideen bewegen mehr

Stückliste Zusatzteile

Pos	Teil	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Anzl
1	001834	Knotenblech		2
2	001824	Grundhalterung	links	1
3	001825	Grundhalterung	rechts	1
4	001753	Senkschraube mit ISK	DIN 7991-M6x12-8.8	4
5	000395	Sechskantmutter	DIN 985-M8-8	4
6	001918	Zylinderschraube mit ISK	DIN 912-M8x65-8.8	4
7	000246	Scheibe	DIN 125-A8.4 (M8)	4
8	034473	Reduzierhülse 12x8x40		4
9	000325	Bohrschraube mit Linsenkapf	DIN 7504N-4.2x13	2
10	001428	Adapterhülse	50 mm	2
11	001422	Steckachse 12mm (99 mm)		2

Feststellbremse

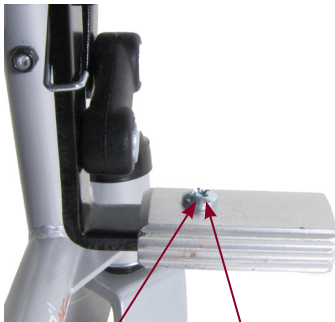

9


Niete ausbohren.
Teil drehen.
Zum Befestigen
Blechschaube verwenden.

linke Seite hinten




2

linke Seite außen

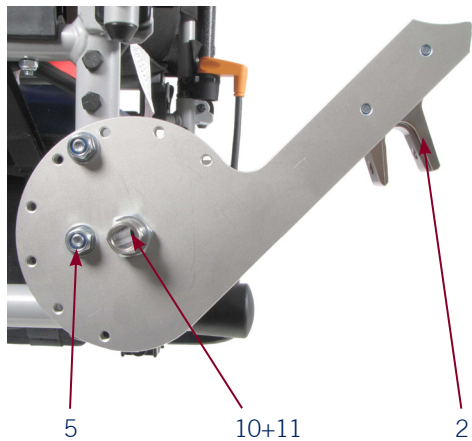

rechte Seite innen

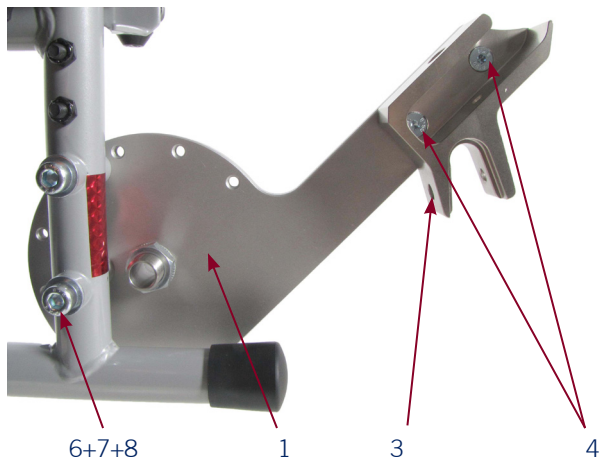

3

Sofern nichts anderes angegeben sind Schraubverbindungen mit Festigkeitsklasse 8.8 oder höher wie folgt anzuziehen.	
Gewindegröße	Drehmoment in Nm
M3	1,1
M4	3
M5	5
M6	10
M8	25
Adapterhülsen	
M16x1	30



Achtung! Der Anbau darf nur durch vom Hersteller autorisierte Fachkräfte erfolgen.



Wichtiger Montagehinweis für Kippstützen!
Eventuell vorhandene Ankipprohre müssen soweit gekürzt werden, dass die Kippstützen frei durchschwingen können.



Sicherung Schraubverbindungen!
Alle Schraubverbindungen ohne Sicherungsscheibe sind mit Schraubensicherungen zu versehen.

Montageanweisungen

Die Knotenbleche müssen parallel zum Rollstuhl angebaut werden.

2 Bohrungen mit Schablone abbohren

Anbau nur für untere Radposition

Notizen

5

Notizen

6

Notizen

7

Ihre Ansprechpartner:

AAT-Anbau-Team · Tel.: +49.(0) 74 31.12 95-555 · anbau@aat-online.de

Datum: 17.04.2020

Version: 1

Kommissioniert von:



AAT Alber Antriebstechnik GmbH · www.aat-online.de · info@aat-online.de
Ehestetter Weg 11 · 72458 Albstadt · Tel.: +49.(0) 74 31.12 95-0 · Fax: 12 95-35