

# ANBAUANLEITUNG

Artikel-Nr.: 320702



Invacare Action 3 Junior  
ohne Trommelbremse 20" Räder

Sitzbreite: 35.5 - 38 mit Radstandsverlängerung

v-max

[www.aat-online.de](http://www.aat-online.de)




Ideen bewegen mehr

## Stückliste Zusatzteile

Pos	Teil	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Anzl
1	001998	Knotenblech		2
2	001824	Grundhalterung	links	1
3	001825	Grundhalterung	rechts	1
4	001753	Senkschraube mit ISK	DIN 7991-M6x12-8.8	4
5	001804	Bundmutter		2
6	001978	Kontakt-Scheibe M16-ZN		2
7	000138	Senkschraube mit ISK	DIN 7991-M8x30-8.8	2
8	000325	Bohrschraube mit Linsenkopf	DIN 7504N-4.2x13	2

## Feststellbremse

nach Umbau

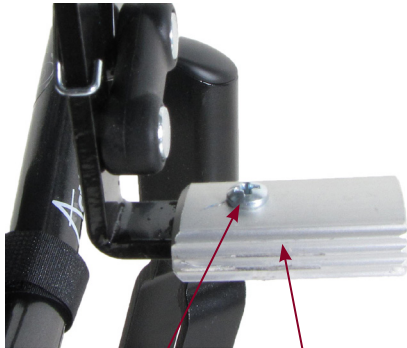

8


180° drehen

vor Umbau




# 2

linke Seite außen

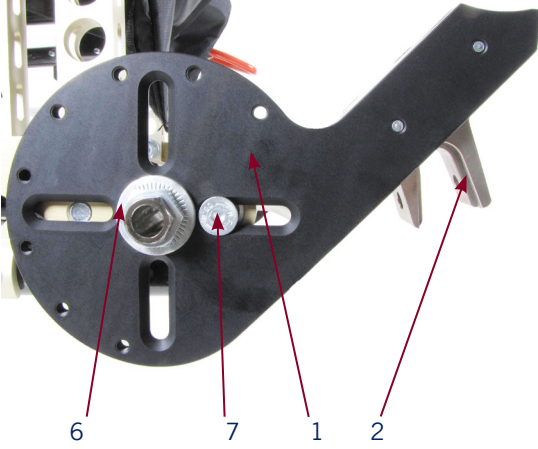

rechte Seite innen

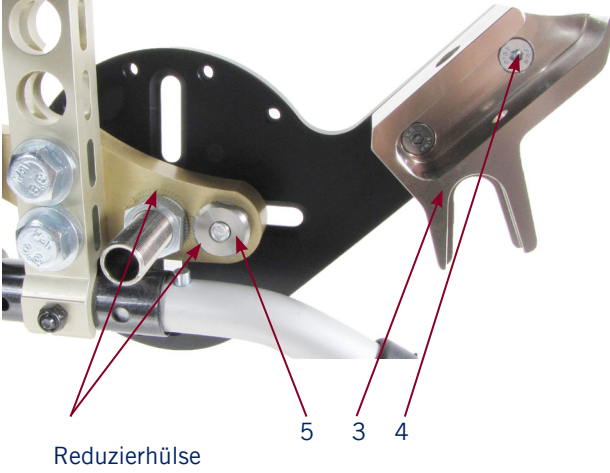

Sofern nichts anderes angegeben sind Schraubverbindungen mit Festigkeitsklasse 8.8 oder höher wie folgt anzuziehen.	
Gewindegröße	Drehmoment in Nm
M3	1,1
M4	3
M5	5
M6	10
M8	25
<b>Adapterhülsen</b>	
M16x1	30



**Achtung!** Der Anbau darf nur durch vom Hersteller autorisierte Fachkräfte erfolgen.



**Wichtiger Montagehinweis für Kippstützen!**  
Eventuell vorhandene Ankipprohre müssen soweit gekürzt werden, dass die Kippstützen frei durchschwingen können.



**Sicherung Schraubverbindungen!**  
Alle Schraubverbindungen ohne Sicherungsscheibe sind mit Schraubensicherungen zu versehen.

### Montageanweisungen

Die Knotenbleche müssen parallel zum Rollstuhl angebaut werden.

**Anbau nur bei AAT möglich.**

## Notizen

1. Bohrung für Aufnahme auf 20mm aufreiben
2. 4 Reduzierhülen 20x16x14 anfertigen

## Notizen

6

## Notizen

7

**Ihre Ansprechpartner:**

AAT-Anbau-Team · Tel.: +49.(0) 74 31.12 95-555 · [anbau@aat-online.de](mailto:anbau@aat-online.de)

Datum: 14.02.2012

Version: 1

Kommissioniert von:



**AAT Alber Antriebstechnik GmbH** · [www.aat-online.de](http://www.aat-online.de) · [info@aat-online.de](mailto:info@aat-online.de)  
Ehstetter Weg 11 · 72458 Albstadt · Tel.: +49.(0) 74 31.12 95-0 · Fax: 12 95-35