


ANBAUANLEITUNG

Artikel-Nr.: 320811

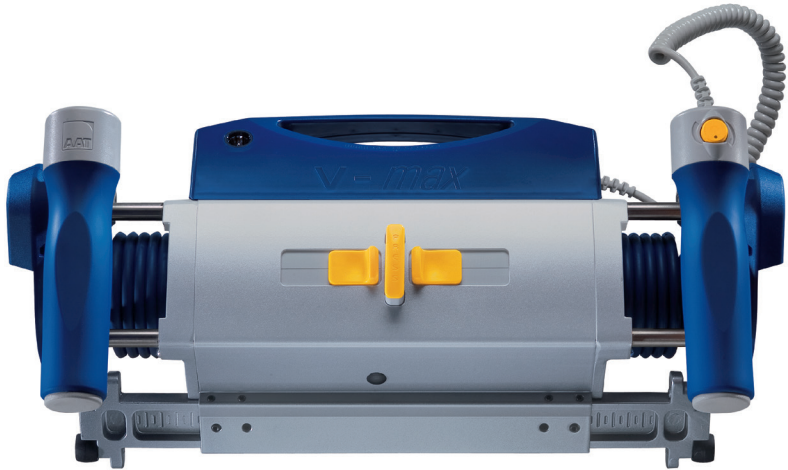

BeRollka F1 mit Trommelbremse

Sitzbreite: Gr. 0 - 3 für 20" Halterung

v-max

www.aat-online.de




Ideen bewegen mehr

Stückliste Zusatzteile

Pos	Teil	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Anzl
1	001998	Knotenblech		2
2	001824	Grundhalterung	links	1
3	001825	Grundhalterung	rechts	1
4	001753	Senkschraube mit ISK	DIN 7991-M6x12-8.8	4
5	001781	Hülse	Ø18 x Ø16 x 7,5mm	4
6	001334	Bundhülse		2
7	000138	Zylinderschraube mit ISK	DIN 912-M8x30-8.8	2
8	000356	Senkschraube mit ISK	DIN 7991-M6x25-8.8	2
9	000301	Sechskantmutter mit Klemmteil	DIN 985-M6-8	2
10	000245	Scheibe	DIN 125-A6.4 (M6)	2

linke Seite hinten

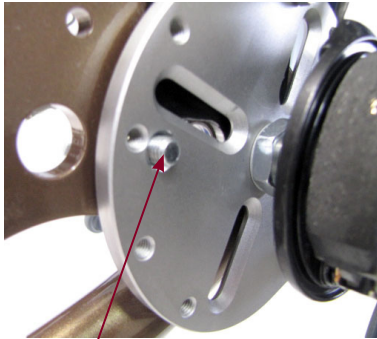


1 Bohrung Abbohren Gewinde M8

Akku




2

linke Seite außen

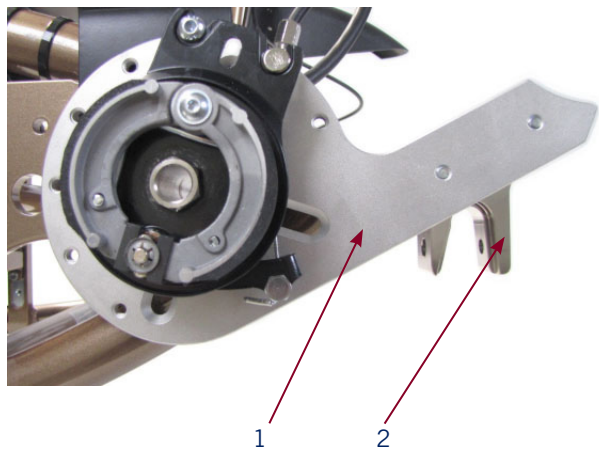

rechte Seite innen

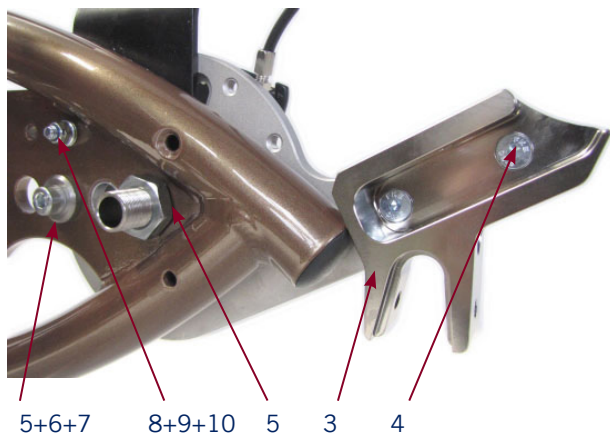

Sofern nichts anderes angegeben sind Schraubverbindungen mit Festigkeitsklasse 8.8 oder höher wie folgt anzuziehen.	
Gewindegröße	Drehmoment in Nm
M3	1,1
M4	3
M5	5
M6	10
M8	25
Adapterhülsen	
M16x1	30



Achtung! Der Anbau darf nur durch vom Hersteller autorisierte Fachkräfte erfolgen.



Wichtiger Montagehinweis für Kippstützen!
Eventuell vorhandene Ankipprohre müssen soweit gekürzt werden, dass die Kippstützen frei durchschwingen können.



Sicherung Schraubverbindungen!
Alle Schraubverbindungen ohne Sicherungsscheibe sind mit Schraubensicherungen zu versehen.

Montageanweisungen

Die Knotenbleche müssen parallel zum Rollstuhl angebaut werden.

Anbau nur bei AAT möglich

**Drehmomentaufnahme abbohren Gewinde M8
Kleiderschutz neu verbohren**

Notizen

5

Notizen

6

Notizen

7

Ihre Ansprechpartner:

AAT-Anbau-Team · Tel.: +49.(0) 74 31.12 95-555 · anbau@aat-online.de

Datum: 26.11.2014

Version: 1

Kommissioniert von:



AAT Alber Antriebstechnik GmbH · www.aat-online.de · info@aat-online.de
Ehestetter Weg 11 · 72458 Albstadt · Tel.: +49.(0) 74 31.12 95-0 · Fax: 12 95-35